

タービンやマイクロモーターハンドピースの

メンテナンスの お悩みを解決!

私が注油するより、
早く確実に
注油してくれる!

使用は簡単なので
毎日のメンテナンスが
楽になりました。

チャック部への
注油も簡単です。

自動注油でタービン、
ハンドピースを
よりよい状態に
保ちます。



最短 **15**^{*}秒!
タービン1本を
自動注油

※タービンの場合

マイクロモーターハンドピース
の場合は85秒(ライトモード)、
145秒(ヘビーモード)が標準
作業時間です。



スプレー時間や
スプレー方法の
ばらつきがなくなり、
しっかり注油できるので
安心です!



ハンドピース自動注油システム

コッシュケア^{プラス}+

ハンドピースのトラブル予防に、 自動注油システムで簡単・確実なメンテナンス。

チャック用ノズル



付属のチャック清掃ノズルを使用(手動)し、チャック内部の汚れや摩耗粉を除去できます。

ハンドピースを同時に4本セット可能



オイル飛散防止フィルター

注油オイルの飛散を軽減します。

使いやすい前面ドア

ハンドピースの出し入れがしやすく、お手入れも簡単。

オイルボトル

従来のスプレーオイル使用時に比べ1回あたりのオイル使用量が少なく、大幅にコストが抑えられます。

- スプレーオイル
1回——20円
- フレッシュケア プラス
1回——4.3円

※交換式オイルボトル
500mL/6,000円



どなたでも
ラクラク、
カンタン操作!



フレッシュケア+ プラス

シンプル操作で、簡単に確実なハンドピースの注油作業が可能です。

STEP 1



ハンドピースをセットし、扉を開める

STEP 2



セレクトボタンで注油するハンドピースを選んで、スタートボタンを押すだけで操作完了

STEP 3

注油

オイルと
エア圧力で
隅々まで注油

エアブロー

ハンドピース内の
余分な油を排出

タービン —— 15秒
マイクロモーター —— 85秒 で注油完了!

※5倍速コントラはヘビーモード(145秒)をおすすめします。

効率的な滅菌システム

※滅菌する医療器材、ご使用になる機器類及び滅菌パックなどの取扱説明書を良くお読みになり正しくお使いください。

FRESH CLAVE

ハンドピースの
滅菌におすすめ!

フレッシュクレーブ

販売名: フレッシュクレーブ
一般的名称: 小型未包装品用高圧蒸気滅菌器
認証番号: 230AFBZX00021000(管理 特管)
製造販売元: (株)東邦技研 埼玉県越谷市大字大林657
標準価格: ¥398,000



流水下洗浄



滅菌する医療器材の取扱説明書をご参照いただき洗浄してください。

注油



フレッシュケア+ならタービンをわずか15秒で注油ができます。

滅菌



約50分(134℃15分)で滅菌送風の全工程は終了します。

保存



インストゥルメントは安心して使用できる状態になりました。

フレッシュケア プラス仕様

- 装着本数…ハンドピース4本
- 注油時間…タービン: 15秒
マイクロモーターハンドピース: 85秒(ライトモード)
145秒(ヘビーモード)
- 供給エア圧力…0.4~0.6Mpa
- 付属品カップリング…タービン用2個、
マイクロモーターハンドピース用2個、チャック用ノズル1個
- オイルタンク容量…500mL(タンク毎交換)
- 電源電圧…AC100V 50/60Hz
- 消費電力…30VA
- 寸法…W280×D275×H308mm
- 重量…5.9kg

オプション・別売品

- オイルボトル
- タービン用アダプター(ST)
- マイクロモーターハンドピース用アダプター
- エアースケーラー用アダプター(LUX)
- エアースケーラー用アダプター(ST)
- エアフィルターキット

標準価格 198,000円

発売元 / 株式会社 **ヨシダ**
東京都台東区上野7-6-9
TEL.0120-178-148(コンタクトセンター)

●取扱店名

禁無断転載



(01)02747937014851

C01923/2020年3月/PRI/20/@20/改